



Traitement sbiancante fai da te!

www.insmile.eu

È molto facile la procedura per avere i tuoi denti più bianchi e brillanti. InSmile ti offre un kit completo per sbiancare i tuoi denti in soli 10 minuti. Il kit è composto da: un applicatore, un gel sbiancante, un pretrattamento, un applicatore, un bite e un fogliolino di cortesia.

**Pretrattamento**  
Non utilizzare su bambini di età inferiore ai 12 anni; Non utilizzare in gravidanza; Il trattamento ha effetto SOLO su denti naturali, quindi NON agire su ricostruzioni quali otturazioni, corone, ponti, faccette ecc.; Non utilizzare nelle due settimane precedenti e successive ad interventi chirurgici; Non abusare nell'uso; Chiedere consiglio al proprio dentista, specialmente se si soffre di ipoplasia o altre patologie correlate alla fragilità dello smalto; Conservare in luogo fresco e asciutto.

Inumidire abbondantemente la spugnetta con il pretrattamento ed effettuare la pulizia dei denti generando una schiuma durante la frizione. Erogare dal tubetto una quantità di gel sufficiente a ricoprire la porzione che andrà a contatto con la superficie esterna dei denti sulle 2 arcate. Il contenuto è dosato per 3 cicli. Posizionare il bite all'interno del cavo orale a contatto con le arcate dentali superiori ed inferiori. Esercitare una lieve pressione con i denti e la dita sulla superficie del bite sufficiente a far aderire il gel alla superficie dentale. Indossare gli occhiali di protezione, puntare la lampada sul bite e accendilo. Mantenere la posizione per 10 minuti. Ripetere l'operazione per 3 cicli identici.

Tre spugnette per detergere i denti con il pretrattamento. Una confezione spray da 4,5 ml di pretrattamento InSmile. Un tubetto contenente il gel sbiancante (15 ml). Un bite. Un fogliolino di cortesia.

**SMALTIMENTO**  
Raccogliere il prodotto usato in un contenitore di plastica e smaltirlo presso i centri di raccolta rifiuti.

**GEL SBIANCANTE**  
Ingredienti: Glycerin, Propylene glycol, Carbomer, Potassium acesulfame, Helianthus annuus seed oil, Mica, Triethanolamine, Sodium perborate, Linalool, Geraniol.

15ml e

**PRETRATTAMENTO**  
Ingredienti: Aqua, Glycerin, Alcohol, Sodium lauryl sulfate, Poloxamer 188, Poloxamer 407, Mentha piperita oil, Helianthus annuus seed oil, Sodium citrate, Sodium saccharin, Sucralose, L-menthyl, Caffeine, Polysorbate 20, Potassium acesulfame, Sodium Benzoate, CI 73015, Linalool.

4,5ml e



PRIMA DOPO

GEL  
Lotto:

924126939

Distribuito da:  
InSmile SRL - Via della Canapa, 5  
Bologna (BO) - www.insmile.eu

MADE IN FRANCE

Traitement sbiancante fai da te!

www.insmile.eu